

MEDICAL DEVICES

Innovating to ease the flow of life



Agilia Volumat




IV Technology



**FRESENIUS
KABI**


caring for life

Volumat Agilia

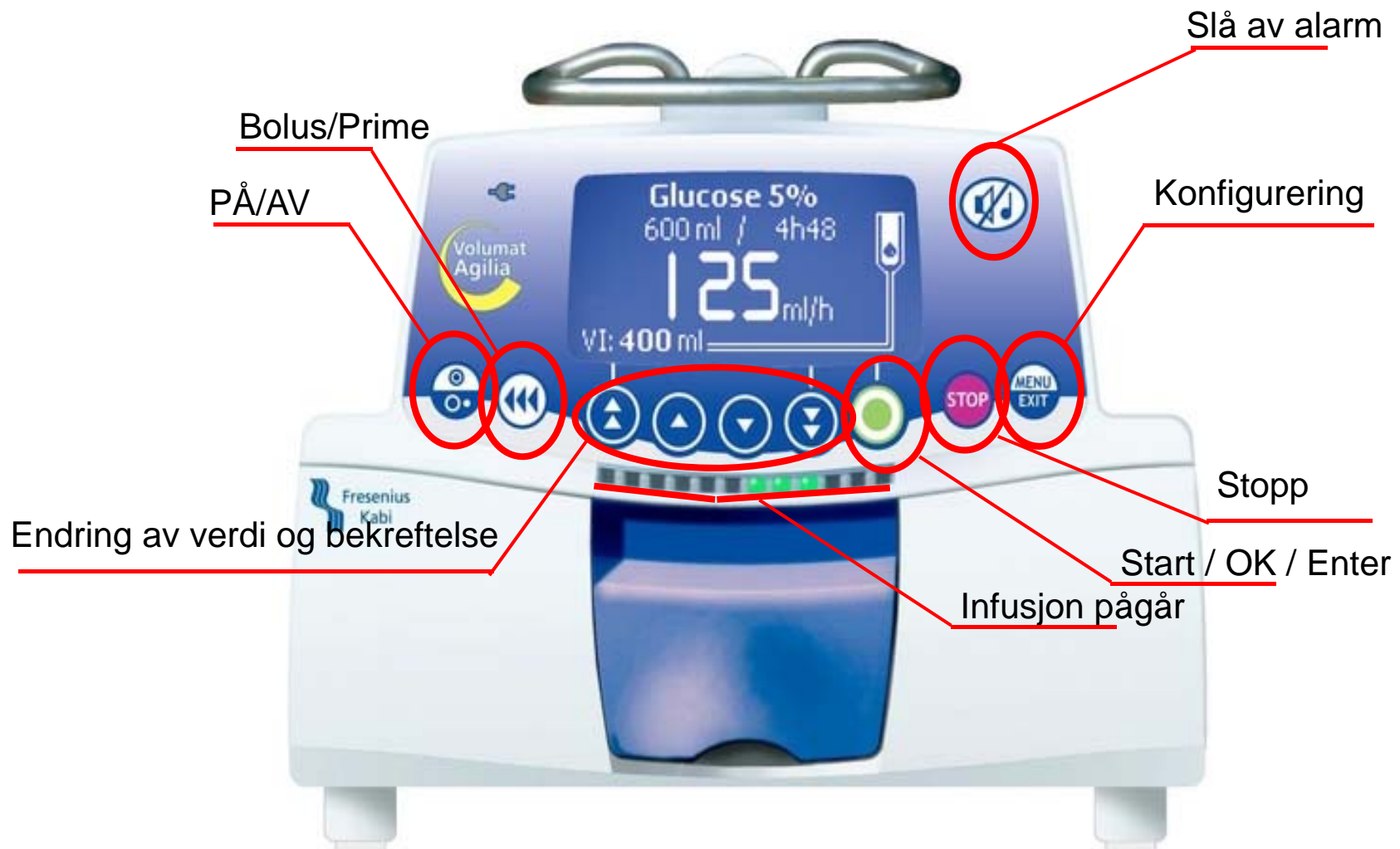

Oversiktlig monitorering

- Strøm indikator lys (eller batteri indikator) informerer om støm kilde
- Hastighet vises i displayet med store indikatorer så hoved informasjonen vises klart og tydelig
- Volume infundert vises hele tiden
- Volume og tid igjen vises i skjermbilde for å informere om gjenverende infusjon
- Medikamentnavn kan legges inn via option
- Dråpe indikatoren
- Flow indikator lys lyser for å indikere pumpens status fra avstand, selv i mørket

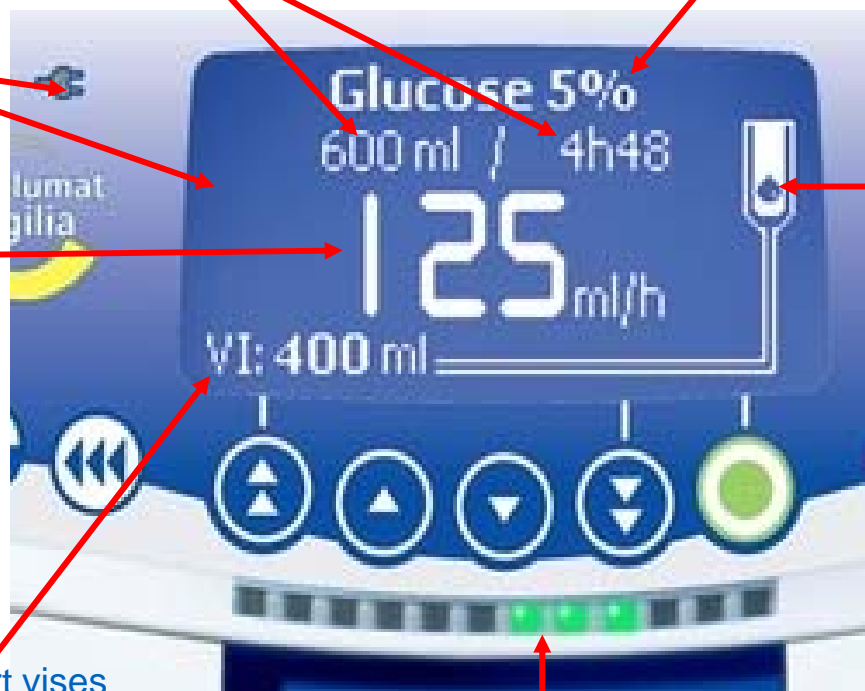

Enkel administrering av iv sett

- Pumpen viser tegninger og beskjeder for å hjelpe sykepleierene

- IV sett koblingen har samme farge og form som den dedikerte spalten i pumpen



Oppstart Volumat Agilia

- Slå pumpen på
- Installer Volumat settet
- Vent på Okklusjon Sjekk Systemet (OCS) testen



Oppstart Volumat Agilia

- Juster Volum



- Tid eller



- Hastighet



- Start infusjonen eller
- C=nytt valg



Pause og Bolus innstilling



- Trykk STOP x 2
- Still inn timer / minutter for PAUSE
- Når PAUSE tid har telt seg ned vil det gå en Alarm.
- Pumpen må startes manuelt, trykk **stop** og deretter **start**.



- Trykk to ganger på boluskanppen for å starte en bolus
- Du gir bolus så lenge du holder bolus knappen inne
- Først trykk på bolusknappen viser hastighet på bolus
- Hvis du vil endre bolushastigheten, holder du bolustasten nede i minst 3 sekunder og endrer bolushastigheten


Avanserte innstillinger

-  ▪ Programmeringer
-  ▪ Service information
-  ▪ Lydnivå alarm
-  ▪ Dato / Klokke
-  ▪ Knappe lås
-  ▪ Pause
-  ▪ Volum infundert
-  ▪ Infusjons innstillinger
-  ▪ Trykk
-  ▪ Volum som skal infunderes
-  ▪ Batteri nivå
-  ▪ Micro innstilling
-  ▪ Natt innstilling
-  ▪ Hendelses logg



Permanent meny valg
Valgfrie innstillinger

Nullstille og endre trykk

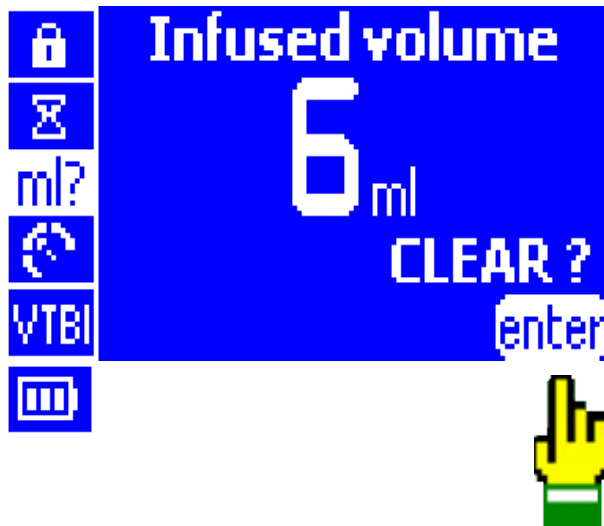

- Trykk meny
- Trykk **ml?**
- **ENTER** x 2
- Pumpen er 0 stillt



- Trykk på **MENU**
- Trykk symbol for trykk
- Trykk på **ENTER**
- Still inn ønsket trykk og bekreft med **OKx2**

Hendelse protokoll



- Trykk menyttast
- Finn symbol for hendelsesprotokoll
- Trykk enter
- Bla ned til ønsket infomasjon
- Trykk enter
- Les av

Hendelsesprotokoll

