

ANALYSENYTT

November 2018

Prøvetaking og prøvebehandling av prøver til adrenokortikotropin (ACTH)

Hormonlaboratoriet har nye retningslinjer for prøvetaking og prøvebehandling av prøver til analyse av ACTH:

- Prøven tas på EDTA-rør. Nødvendig prøvevolum = 0,5 ml plasma.
- Røret fylles helt.
- EDTA-røret sentrifugeres innen 30 minutter.
- Plasma overføres til plastrør og fryses umiddelbart.
- **Plasma sendes frosset til laboratoriet.**

EDTA-røret behøver dermed ikke lenger å stå i isvann før/etter prøvetaking, og det trenger ikke kjølesentrifugeres. Plasma fryses fremdeles rett etter sentrifugering og sendes frosset.

