

Loggskjema for periodisk kontroll av sterilisator med biologiske indikatorer

Virksomhet:	Sterilisator:	Ansvarlig person:
År:	Testfrekvens:	Produsent/leverandør:

Dato	Syklusnr.	Program	Steriliserings- temp. (°C)	Steriliserings- tid (min.)	Lotnr/ prøvenr.	Utført av

Dato	Testresultat	Sign.



Forklaring:**Virksomhet:** Navnet på legekantoret/tannlegeklinikken/avdelingen o.l.**Sterilisator:** Skal identifisere hvilken sterilisator skjemaet gjelder for.**Ansvarlig person:** Person som er ansvarlig for sterilisatoren.**År:** Gjeldende år.**Testfrekvens:** Hvor ofte sterilisatoren skal testes (for eksempel 4 x årlig, jan – apr – jul – okt). Anbefalt minimum 4 x per år.**Produsent/leverandør:** Eksempel: Etigam/RH-spore.**Dato:** Den datoen testen utføres.**Syklusnummer:** Testkjøringens syklusnummer for de sterilisatorene som har dette. Her kan også batch-etiketten festes.**Program:** Type program testen er kjørt på, for eksempel Universalprogram.**Steriliseringstemperatur:** Valgt temperatur.**Steriliseringstiden:** Antall minutter ved valgt steriliseringstemperatur (holdetid), ikke den totale prosessiden.**Lot nr. BI/prøvenummer:** Lotnummeret til den biologiske indikatoren finnes på selve prøven, samt på rekvisisjonen. Prøvenummeret likeså.**Utført av:** Den som har utført selve testen signerer i dette feltet.**Dato:** Dato for ferdig analysert prøve – dette finnes nederst på rekvisisjonen som kommer i retur.**Testresultat:** Ingen vekst/vekst (på x antall indikatorer).**Sign.:** Den som har mottatt og registrert prøvesvaret signerer i dette feltet.

Eksempel:

Virksomhet: <i>Hopp og sprett</i>		Sterilisator: <i>3</i>		Ansvarlig person: <i>Heidi</i>					
År: <i>2016</i>		Testfrekvens: <i>1 x mnd</i>		Produsent/leverandør: <i>Etigam/RHspore</i>					
Dato	Syklusnr.	Program	Steriliserings-temp. (°C)	Steriliserings-tid (min.)	Lotnr./prøvenr.	Utført av	Dato	Testresultat	Sign.
<i>15.jan</i>	<i>425</i>	<i>Universal</i>	<i>135,2</i>	<i>3:30</i>	<i>315182 (6493)</i>	<i>Hege</i>	<i>29.jan</i>	<i>Ingen vekst</i>	<i>MB</i>
<i>13.feb</i>	<i>493</i>	<i>Universal</i>	<i>135</i>	<i>3:30</i>	<i>3152601 (1206)</i>	<i>Mari</i>	<i>25.feb</i>	<i>Ingen vekst</i>	<i>HH</i>