

LOGGSKJEMA FOR VANNDAMPSTERILISATOR

STERILISATOR: _____ ÅR: _____ MÅNED: _____ SKJEMA NR. _____

STERILISERING				SYKLUSKONTROLL (se display)				KONTROLL AV GODS				
Batchetikett	Program	Dagssyklus	Sign.	Samlet syklus	Temperatur °C (max/min)	Holdetid (min.)	Trykk/bar (lekkrate for VT)	Tørr last Ja/Nei	Prosess-indikator kontrollert	Alarmnr.	Prosess godkjent Ja/Nei Sign.	Gods godkjent Ja/Nei Sign.

Se forklaring på baksiden

STERILISERING

Batchetikett: Inneholder steriliseringsdato, sterilisatornummer og samlet syklusnummer.

Program: Valgt test-/steriliseringsprogram. Skriv forkortelsestegn.

Dagssyklus: Tall på enkelte kjøring.

Sign.: Den som kontrollerer syklusen signerer her.

SYKLUSKONTROLL

Samlet syklus: Kumulativt prosessnummer som vises i displayet etter avsluttet program.

Temperatur: Viser i displayet etter avsluttet program.

Holdetid: Holdetid (steriliseringstid) i minutter.

Trykk/bar (lekkrate for VT): Kammertrykk (i bar) som vises i displayet etter avsluttet program. Vakuumtest (VT) føres inn med lekkrate-verdi i mbar/minutt.

KONTROLL AV GODS

Tørr last: Gods som er fuktig etter sterilisering er i fare for å bli rekontaminert.

Prosessindikator kontrollert: Den kjemiske indikatoren skal alltid kontrolleres etter sterilisering.

Alarmnummer: Dersom en alarm har gått, skal dette noteres og avviksskjema fylles ut.

Prosesen godkjent Ja/Nei Sign: Den som kontrollerer syklusen skal oppgi om prosessen er godkjent og signere.

Gods godkjent Ja/Nei Sign.: Den som kontrollerer syklusen skal oppgi om godset er godkjent og kan frigis til bruk.